

ALKANTIS

L A B O R A T O I R E

1. STERILE, TROCKENE UND ANHALTENDE KÄLTE ALS EINWEG-KOMPRESSE



ALKANT **IS**¹⁸⁰
[Ice Sterile]

PHARMAKODYNAMIK DER KÄLTE

► DIE KÄLTE ERMÖGLICHT EINEN LOKALEN EFFEKT

- INDEM SIE DIE SCHMERZEMPFINDLICHKEIT WIRKSAM SENKT
- INDEM SIE DIE VASKULÄRE ANTWORT (VASOKONSTRIKTION) AKTIVIERT
- INDEM SIE DEN ZELLMETABOLISMUS SENKT

► DIE KÄLTE ERMÖGLICHT ES DEN SCHMERZ ZU BEHANDELN


- MIT HILFE EINES LOKALEN STATT EINES MEDIKAMENTÖSEN ANSATZES
- ANTALGISCHE AKTION
- ENTZÜNDUNGSHEMMENDE AKTION
- ANTIÖDEMATÖSE AKTION

WICHTIGE INNOVATION VON LABORATOIRE ALKANTIS

- STERILES MEDIZINISCHES PRODUKT ENTWICKELT FÜR KRANKENHÄUSER
- 4 JAHRE FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- AKTIVIERT SICH DURCH EIGENES STERILES WASSER
- HYPOALLERGENE VLIES-KOMPRESSE
- POLYMER MIT SPEZIFISCHER GRADIENT-VERNETZUNG
- MEDIZINISCHES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ANFORDERUNGEN NACHHALTIGER ENTWICKLUNG (ATOXISCH, LATEXFREI, WASSERSPAREND)
- DM DER KLASSE 1S - KENNZEICHNUNG CE N°1014
- WENN SCHMUTZIG WIE HAUSMÜLLÄHNLICHE ODER KLINISCHE ABFÄLLE BEHANDELN
- INTERNATIONAL PATENTIERTES VERFAHREN

PHARMAKOKINETIK DER WIRKSAMEN KÄLTE

ALKANTIS¹⁸⁰ : > 3 STUNDEN WIRKSAME KÄLTE VON 5 BIS 12 °C

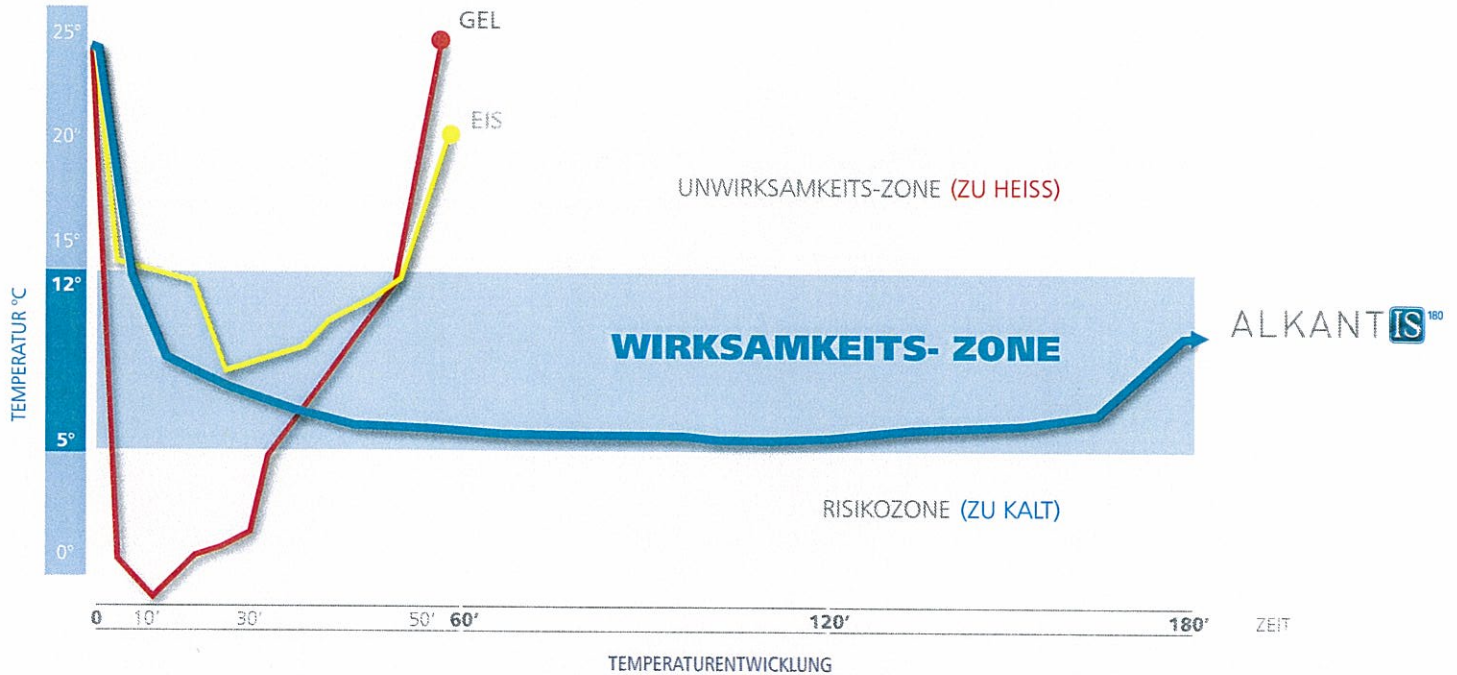

TEST AUF DEM LINKEN ARM (MASSE GEL 310 G, EIS 150 G, ALKANTIS® CA. 150 G)
 TEST APAVE BERICHT NR. 2258860 UND NR. 50505561 (GEGLÄTTETE TEMPERATUR-ENTWICKLUNG)

ALKANTIS® VERTEILT EINE KÄLTE MIT FOLGENDEN EIGENSCHAFTEN:

- STERIL** MEDIZINISCHES, NICHT KONTAMINIERENDES PRODUKT
- TROCKEN** WEDER VERBÄNDE NOCH LAKEN WERDEN NASS
- LANGE WIRKSAMKEITSDAUER...** > 3 STUNDEN
- WIRKSAM** GIBT EINE KÄLTE ZWISCHEN 5 UND 12 °C AB
- KOMPRIMIERBAR** LEICHT ANZUWENDEN UND ANZULEGEN
- ERGONOMISCH** ERMÖGLICHT EINE LOKALE, GEZIELTE ANWENDUNG AN DER ZU BEHANDELNDEN ZONE

ALKANTIS¹⁸⁰


[Ice Sterile]

EINFACHE HANDHABUNG




1

KLACK

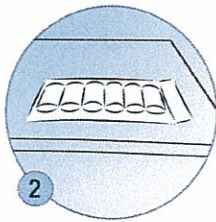

2

1 Min. WARTEN

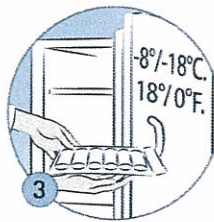


3

90 Min. TIEFKÜHLEN
-8°/-18°C
18°/0°F



4

AM PATIENTEN ÖFFNEN

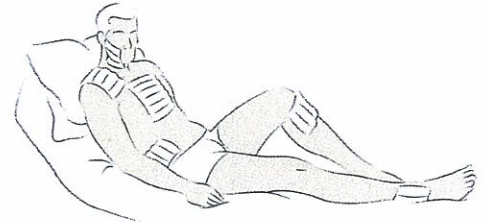

AN DER ZU BEHANDELNDEN ZONE ANWENDEN

- ① - WASSERTASCHEN BRECHEN DURCH EINEN HEFTIGEN SCHLAG MIT DEM HANDBALLEN
- ② - WARTEN BIS DIE KOMPRESSE DAS WASSER ABSORBIERT
- ③ - INS GEFRIERFACH GEBEN FÜR MINDESTENS 90°
- ④ - ABZIEHBARE VERPACKUNG ÖFFNEN BEIM PATIENTEN FÜR SOFORTIGE ANWENDUNG, NACH GEBRAUCH ENTSORGEN

ABMESSUNGEN DER AKTIVIERTEN KOMPRESSE 180X100 MM / GEWICHT: 150 G

WO FINDEN SIE ALKANTIS¹⁸⁰



www.alkantis.com

ALKANTIS

L A B O R A T O I R E

Laboratoire ALKANTIS FRANCE
36 bis avenue du Général de Gaulle / 69110 SAINTE-FOY-les-LYON - FRANCE
e-mail : info@alkantis.com

Tél : +33 (0)4 82 62 60 20 / Fax : +33 (0)4 82 62 60 21