

Bedienungsanleitung

V002 - 08/2010



Sterile Kältekomresse für den Einmalgebrauch

ALKANTIS: steriles Medizinprodukt bestehend aus 1 Komresse und 1 Wasserbeutel

Abmessung der aktivierten Komresse: 180 mm x 100 mm Gewicht: 150 g

Zusammensetzung: Komresse: Polypropylen Pulver: Technopolymer Wasser: gefiltert (22 µ)

Sterilisation durch Gammastrahlen

ANWENDUNGSGEBIETE

Postoperative Schmerzen nach ALLGEMEINEN CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN und insbesondere in folgenden Bereichen:

- Orthopädie
- Abdominal- und Thoraxchirurgie
- Stomatologie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Urologie
- Gynäkologie
- Dermatologie
- Verbrennungen

Schmerzen aufgrund von Verletzungen. Anwendung in der NOTAUFNAHME und insbesondere in folgenden Fällen:

- Gelenkschmerzen (Verstauchung)
- Schläge, Quetschungen, Verkehrsunfälle

Steriles Einmal-Medizinprodukt. Nicht zur Wiederverwendung. Nach Gebrauch entsorgen.

EIGENSCHAFTEN

- Trockene, dauerhaften Kühlung mit einer Kompressionswirkung von ca. 3 Stunden.
- Für Erwachsene und Kinder geeignet.

WIRKUNGSWEISE DER KOMPRESSE

- **Schmerzlindernd:** Kälte beruhigt den Schmerz.
- **Entzündungshemmend:** Kälte wirkt der Entstehung von Ödemen entgegen.
- **Blutstillend:** Kälte verringert aufgrund der Vasokonstriktion der Blutgefäße Blutungen der verletzten Muskelfasern.
- **Krampflösend:** Kälte verringert Spasmen und Muskelkontrakturen.

GEGENANZEIGEN

- Kälteallergie
- Kälteüberempfindlichkeit (Raynaud-Syndrom)
- Kryoglobulinämie

VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Nicht verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken unmittelbar den Arzt aufsuchen. Bei zu starker Kühlung einige Augenblicke vor dem Auflegen warten. Nicht verbrennen.
- Komresse für den einmaligen Gebrauch. Bei beschädigter Vakuumverpackung Komresse nicht verwenden.
- Nicht mehr als 2 Stunden auf einer Wunde zurücklassen



ALKANTIS SA, Rue de Hesse 16, 1204 Geneva, Switzerland

AUFBEWAHRUNG

- Vor der Aktivierung: ALKANTIS vor Licht geschützt bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C aufbewahren.
- Nach der Aktivierung: ALKANTIS in der sterilen Verpackung im Gefrierschrank aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden (siehe äußere Verpackung).

BENUTZUNGSHINWEISE

- Die Kältekomresse beim ersten bzw. erneuten Auftreten der Schmerzen auflegen.
- Anwendung 3 bis 5 Tage nach der Operation morgens, mittags und abends, anschließend bei Bedarf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Aktivieren der Komresse:

1. Die Komresse ALKANTIS auf eine flache Unterlage legen.
Den mit Wasser gefüllten Beutel durch einen leichten Schlag mit dem Handballen brechen.
Wichtiger Hinweis: Die Komresse ALKANTIS flach liegen lassen. Etwa 1 Minute warten, bis die gesamte Wassermenge aufgesogen ist (einheitliche Form).
2. Das Medizinprodukt mindestens 90 Minuten in den Gefrierschrank oder das Eisfach legen, ohne es zu öffnen. Die Komresse ALKANTIS kann im Voraus vorbereitet und mehrere Tage im Gefrierschrank aufbewahrt werden.


Anwendung:

3. Die Komresse ALKANTIS aus dem Gefrierschrank nehmen.
4. Die Schutzhülle am Patienten entfernen.
5. Die Komresse aus der Verpackung nehmen und an der zu behandelnden zone anwenden.
6. Die Komresse nach Gebrauch entsorgen (Hausmüllähnliche Abfälle (DAOM) bzw. bei verschmutzten Kompressen Abfälle aus Pflegetätigkeiten mit Infektionsgefahr (DASRI)).

Das Produkt vor dem Brechen des Wasserbeutels und Aktivieren der Komresse ALKANTIS nicht im Gefrierschrank aufbewahren.



EINFACHER UND SCHNELLER GEBRAUCH IN 4 SCHRITTEN

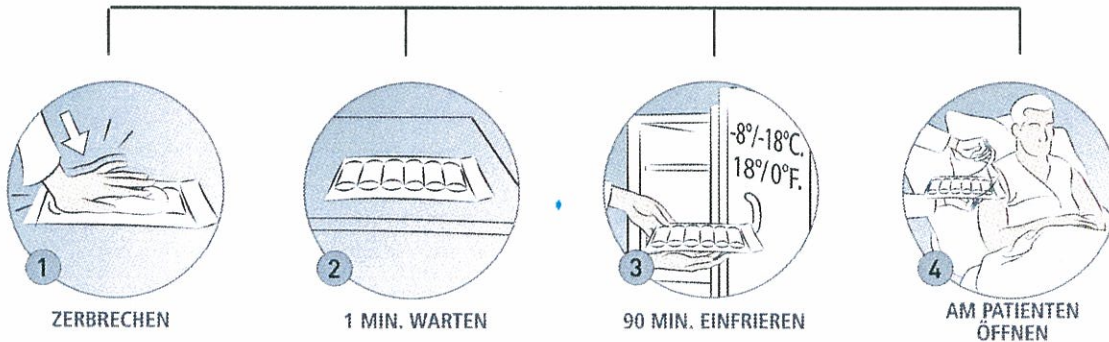

01 - Den Wasserbeutel auf einer flachen Unterlage durch einen leichten Schlag mit dem Handballen brechen.

02 - Warten, bis die gesamte Wassermenge aufgesogen ist.

03 - Die Komresse für mindestens 90 Minuten in den Gefrierschrank legen.

04 - Die Schutzhülle am Patienten abziehen und direkt auflegen (ggf. Wasserbeutel entfernen).

Von verteilt: ALKANTIS FRANCE

36bis, avenue du Général de Gaulle, 69110 Sainte Foy les Lyon

CE-Zeichen: 05/2010

www.alkantis.com



1014