


Outil Usage Unique Plastique

Einweg-Plastikinstrument

POZZI-Zange

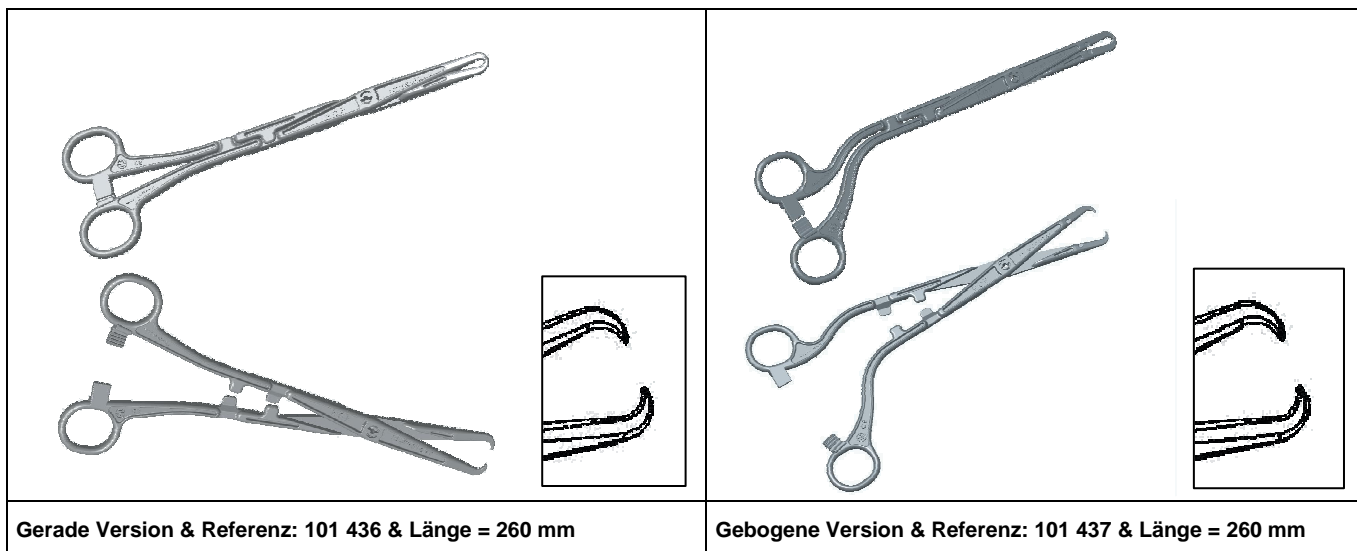

VERWENDUNG

Die POZZI-Zange ist eine Zange mit Häkchen, die zum Vorhalten und zum Fixieren von dickem Gewebe, insbesondere dem Uterushals (Zange zum Uterusziehen), dient.

Sie wird unter anderem verwendet bei Schwangerschaftsabbrüchen und beim Einsetzen eines Intrauterinpressars.


Die Häkchen ermöglichen es, den Uterushals zu fassen. Die Traktion des Halses ermöglicht eine Aufrichtung des Uteruskörpers und so die Ausrichtung von Uterushals und Uteruskörper, wobei der Uterushals weniger beweglich als der Uteruskörper ist. Der Uterus ist das zentrale Organ in der Beckenhöhle der Frau. Er besteht aus einem dicken Muskel und sein Hohlraum ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Der Uterus ist aufgeteilt in Grund, Körper und Hals.

Der Winkel zwischen der Achse der Vagina und der des Uterushalses ist je nach Frau variabel (er beträgt weniger oder mehr als 90°).

BESCHREIBUNG

Verwendung:	Einmalgebrauch
Klasse:	IIa
Konformität:	Richtlinie 93/42/EWG (CE Kennzeichnung) Nr. CE 0120
Material:	USP - Klasse VI , geeignet zur Sterilisation mit Ethylenoxid (Norm EN 550) und zur GAMMA-Strahlen-Sterilisation (Norm EN 552)
Farbe:	Grau FDA
Sterilisierung:	Ethylenoxid
Verpackung:	Aufreißbare Einzelverpackung
Packmenge:	Schachtel mit 25 Stück

Kennzeichnung des Produktes:

- Produkt: Hergestellt in Frankreich
- CE (konform der Richtlinie 93/42/EWG)
-  : "EINMALVERWENDUNG" gemäß Norm EN 980.
- OUUP®: Eingetragenes Warenzeichen, Eigentum PauCaPlast